

MODE D'EMPLOI

TAU MINI

TAU STERIL désire d'abord vous remercier pour votre achat.

1 - Tourner le bouton du thermostat et arrêter l'indicateur sur la température désirée.

2 - Tourner le bouton du minuteur et arrêter l'indicateur sur le temps désiré.

3 - Mettre l'interrupteur en position " ON " .
votre stérilisateur est, maintenant, en fonction
et les voyants orange et vert vous le confirment.

Le voyant orange s'éteindra dès la température désirée atteinte.
Pour maintenir cette température durant tout le cycle, il
s'allumera et s'éteindra alternativement

Pour une utilisation correcte, on recommande de ne pas
remplir les rayons à l'excès afin de permettre une bonne
circulation de la chaleur.

On obtient une stérilisation parfaite avec l'élimination totale de
tout germe pathogène, même le plus résistant à la chaleur.

Les temps de stérilisation varient selon le
matériel à stériliser : Entre 10 et 15 minutes
minimum, et 45 à 60 minutes maximum, à 180°C.
Nous déconseillons toutefois de monter à
plus, ceci afin d'éviter toute détérioration des matériaux
stérilisés.

ATTENTION : assurez-vous que le voltage
principal corresponde bien à celui du stérilisateur.